

FAUTEUIL RELEVEUR ZERO G – 821031

MANUEL D'INSTRUCTIONS



INTRODUCTION

Le fauteuil releveur Zéro G est conçu pour aider les personnes à se lever aisément du fauteuil à l'aide de moteurs commandés électroniquement.

Veillez lire attentivement le manuel pour assurer une bonne utilisation du fauteuil, et particulièrement les notes relatives à la sécurité.

SPECIFICATIONS

ALIAS Santé

5 Chemin des Hauts Chèvremonts, 91310 LINAS - Tel 07 68 50 16 91 - www.aliassante.fr

Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest

Largeur Assise	50 cm	Alimentation	100-240V // 50Hz – 40W
Profondeur Assise	50 cm		Moteur Okin
Hauteur Assise	53 cm	Matériaux	Revêtement en PU et microfibre
Dossier	71 cm	Structure	en bois et acier
Poids du Fauteuil	58 kg		Remplissage en mousse PU et fibres de polyester
Charge Maximale	155 kg		

SÉCURITÉ

1. Assembler le fauteuil correctement conformément aux instructions d'assemblage ci-jointes. Les fabricants du fauteuil, leurs mandataires et distributeurs ne sont pas responsables des dommages causés par un assemblage inadéquat.
2. Placer le fauteuil sur un plancher de niveau et plat.
3. Ne pas utiliser le fauteuil dans un environnement excessivement humide ou poussiéreux pour éviter les risques de décharge électrique et les problèmes mécaniques. Le fauteuil doit être placé dans une pièce sèche. Ne pas utiliser le fauteuil lorsque la température ambiante dépasse 40 degrés.
4. Ne pas utiliser le fauteuil à l'extérieur.
5. Lorsque le fauteuil est inutilisé pendant une longue période, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter toute surchauffe.
6. Ne pas déposer ni placer d'objet lourd sur les accoudoirs, le repose pieds ou le dossier du fauteuil.
7. Ne pas sauter ni jouer sur le fauteuil. Les enfants qui utilisent le fauteuil doivent être supervisés par un adulte. Le fauteuil n'est pas conçu pour les enfants.
8. S'assurer que la tension correspond aux spécifications indiquées pour le fauteuil. La connexion électrique doit être effectuée conformément aux règlements locaux. Ne pas débrancher la fiche de la prise murale brusquement et ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
9. Ne pas brancher ni débrancher la fiche de la prise murale avec les mains mouillées. Il pourrait y avoir un risque de décharge électrique ou de panne mécanique.
10. Ne pas utiliser le fauteuil si le cordon ou la fiche de l'adaptateur est endommagé ou si la prise électrique est excessivement lâche.

ALIAS Santé

5 Chemin des Hauts Chèvremonts, 91310 LINAS - Tel 07 68 50 16 91 - www.aliassante.fr

Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest

11. Faire preuve de prudence en actionnant la fonction d'élévation lorsque le dossier du fauteuil est incliné. Le dossier doit être en position verticale au moment de prendre place sur le fauteuil ou de s'en lever, sauf dans le cas d'un transfert latéral avec élévation verticale.

12. Engager le frein des roulettes et s'assurer que le fauteuil est stable avant le transfert.

En cas de dysfonctionnement, merci de contacter votre revendeur.

Remarque : Toutes les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.

Mise en garde : Une hausse soudaine de la température peut créer de la condensation sur les pièces électriques ou mécaniques. Il est recommandé de laisser le fauteuil à température ambiante pendant au moins une heure avant de l'utiliser pour assurer un fonctionnement adéquat et réduire les risques de panne mécanique.

Ne pas utiliser le fauteuil releveur dans les situations suivantes :

- a) Déversement accidentel d'eau sur l'appareil. Ceci pourrait causer une décharge électrique.
- b) Déchirement du revêtement, exposant la mécanique intérieure.
- c) Défaillance ou toute autre condition anormale pendant le fonctionnement.

Faire preuve de prudence en cas de panne de courant. Il y a risque de blessure si l'alimentation est rétablie de manière imprévue et que les touches de fonctionnement sont activées.

Éviter d'utiliser le fauteuil pendant des orages violents.

Éteindre la commande de mise en marche immédiatement et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale en cas de dommage apparent ou de mauvais fonctionnement.


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

- 1) Retirer le siège et le dossier de leur emballage.
- 2) Tenir le siège et le rabat du revêtement des deux mains et aligner les supports.
- 3) Exercer une pression vers le bas et s'assurer que les deux côtés s'enclenchent en position verrouillée.

ALIAS Santé

5 Chemin des Hauts Chèvremonts, 91310 LINAS - Tel 07 68 50 16 91 - www.aliassante.fr


Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest

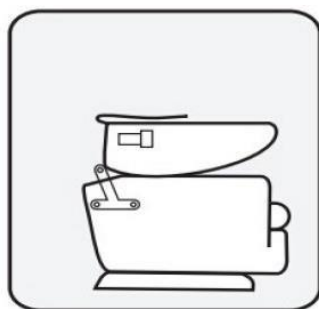

Étape 1



Étape 2

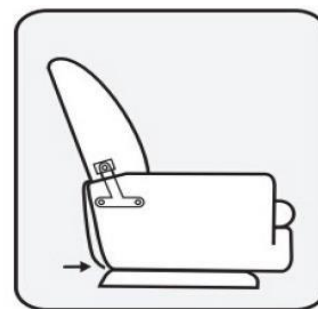

Étape 3


Note : Les deux supports arrière doivent être glissés sur les barres verticales simultanément pour éviter tout blocage.

Note : Ne pas assembler le fauteuil si le revêtement ou toute pièce du fauteuil sont endommagés.

CONNEXIONS ELECTRIQUES

Note : Les fils doivent être correctement connectés pour un fonctionnement adéquat.

- 1) Connecteur du moteur au fil
- 2) Connecteur du fil à l'adaptateur
- 3) Connecteur de l'adaptateur à la fiche
- 4) Connexion de la télécommande

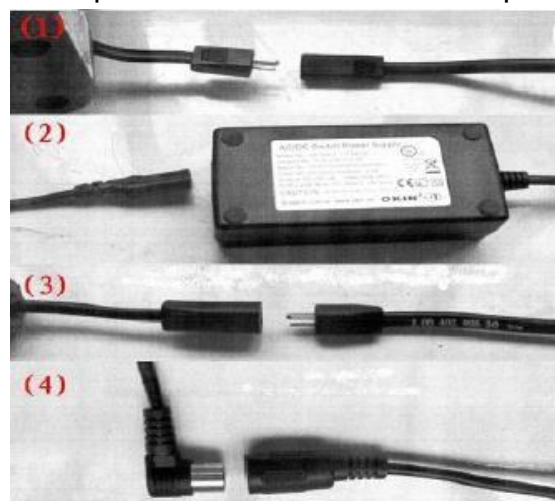

POSITIONNEMENT DU FAUTEUIL

Laisser un espace suffisant à l'avant et à l'arrière du fauteuil pour permettre de l'incliner.

Pour permettre une inclinaison dégagée, garder un espace minimal de 65 cm derrière le fauteuil.

Laisser au moins 40 cm devant le fauteuil.

Placer le fauteuil sur une surface ou un plancher de niveau dans une pièce sèche.

Mise en garde

Éliminer toute obstruction derrière ou devant le fauteuil pour permettre une inclinaison et une élévation sécuritaires durant le fonctionnement.

La section entre le siège et le repose-pied doit être libre de tout encombrement pour éviter les risques de pincement lorsque le fauteuil est utilisé.

ALIAS Santé

5 Chemin des Hauts Chèvremonts, 91310 LINAS - Tel 07 68 50 16 91 - www.aliassante.fr

Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

1. Entreposage

Essuyer la poussière et la saleté. Garder le fauteuil propre et loin des endroits à humidité élevée.

Si le fauteuil est inutilisé pendant une longue période, le couvrir d'un morceau de tissu pour le protéger de la poussière. Entreposer dans un endroit sec.

Ne pas entreposer le fauteuil sous les rayons du soleil ou dans des endroits où la température est élevée. L'exposition pourrait entraîner la décoloration du tissu.

2. Entretien

Avant de nettoyer, s'assurer que l'interrupteur est éteint et que la fiche d'alimentation est débranchée de la prise.

Ne pas utiliser de lingettes humides pour nettoyer les fauteuils avec revêtement en similicuir (polyuréthane) à moins qu'il s'agisse de notre similicuir résistant à l'incontinence. Les agents de nettoyage du cuir peuvent être utilisés.

3. Corps du fauteuil

Utiliser du savon très doux pour nettoyer le plastique, la structure et le revêtement du fauteuil. Nettoyer délicatement toute trace de savon à l'aide d'un linge sec.

Pour nettoyer une tache sèche, tremper un morceau de tissu doux dans une eau savonneuse tiède, bien essorer et nettoyer la tâche.

Ne pas utiliser d'agents de nettoyage comme le benzène ou un diluant, ni aucun autre nettoyant pouvant causer la décoloration du tissu ou rayer le revêtement.

Ne pas retirer le revêtement pour le nettoyer. Il est strictement interdit de repasser le revêtement au fer.

SYSTEME DE BATTERIE DE SECOURS

Les fauteuils sont munis d'un système de batterie de secours pour permettre à l'utilisateur de se lever du fauteuil lors d'une panne d'alimentation. Deux batteries de 9 volts sont requises et non comprises avec le fauteuil.

Dans le cas d'une panne d'électricité, le fauteuil passera automatiquement aux batteries de secours, mais uniquement le temps d'un cycle avant que les batteries soient déchargées. Il est recommandé de remplacer les batteries après chaque utilisation d'urgence.

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Le fauteuil releveur Pro Classic est muni d'une fonction d'élévation et de descente verticale. Cette fonction permet de soulever ou d'abaisser le fauteuil si nécessaire pour permettre le transfert sécuritaire de l'utilisateur du fauteuil au lit ou à une autre surface. Lorsque le fauteuil est soulevé à la hauteur appropriée, l'accoudoir du fauteuil du côté du transfert peut être retiré et l'utilisateur peut alors glisser sur le lit. Les deux accoudoirs peuvent être retirés pour choisir le côté du transfert.

Mise en garde : S'assurer que les verrous sont activés sur les roulettes arrière du fauteuil durant les transferts pour éviter les accidents ou les blessures.

Utiliser uniquement un linge sec pour nettoyer la télécommande. L'humidité excessive peut endommager la télécommande.


1 - Lever le fauteuil

2 - Incliner le dossier, descendre le repose pied et fonction Zéro Gravité

ALIAS Santé

5 Chemin des Hauts Chèvremonts, 91310 LINAS - Tel 07 68 50 16 91 - www.aliassante.fr

Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest

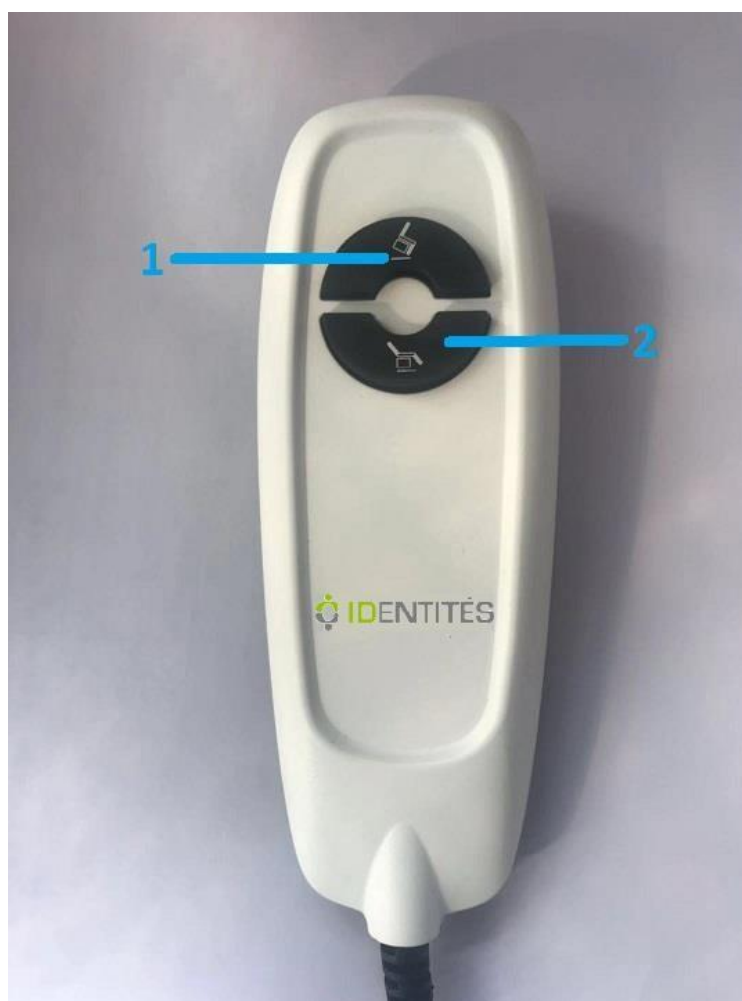**ALIAS Santé**

5 Chemin des Hauts Chèvremonts, 91310 LINAS - Tel 07 68 50 16 91 - www.aliassante.fr

Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest